

СОСТАВ НАБОРА:

Безопасный ланцет - 2 шт
Пробирка микроветта - 1 шт
Транспортная пробирка - 1 шт
Спиртовая салфетка - 2 шт
Пластырь бактерицидный - 2 шт

До приезда курьера храните биоматериал в строго вертикальном положении в холодильнике при температуре 2-8 °С!

Срок хранения образца в холодильнике до приезда курьера не должен превышать 24 ч, поэтому постарайтесь не проводить тест в выходные дни.

Неправильное хранение биоматериала до приезда курьера может послужить причиной его непригодности для проведения теста!

1. Зарегистрируйте личный кабинет на сайте myareal.ru Там вы сможете отслеживать статус исследования.
2. Введите номер пробирки в соответствующее поле личного кабинета на myareal.ru
3. Внимательно прочтите инструкцию по сбору образца биоматериала.

4. Для удобства забора образца капиллярной крови заранее достаньте и разложите перед собой все элементы набора. При необходимости воспользуйтесь помощью.

5. Мы рекомендуем выпить стакан воды за 30 мин до забора образца крови.

6. Приступайте к сбору образца следуя рекомендации:

ПОДГОТОВКА МЕСТА ПУНКЦИИ

- Выберите место прокола (подушечка пальца) и тщательно разотрите его.



- Прогрев места пункции способствует повышению циркуляции крови и упрощает процедуру забора образца.

ПРОКОЛ И ВЗЯТИЕ ПРОБЫ


- Продезинфицируйте место прокола с помощью одноразовой спиртовой салфетки из набора.
- Дайте средству полностью высохнуть.
- Зафиксируйте обработанный палец рукой, произведите прокол безопасным ланцетом.

ПОДГОТОВКА БЕЗОПАСНОГО ЛАНЦЕТА


Ланцет с голубой кнопкой предназначен для детей и людей с чувствительной кожей.



- Поверните выступающую часть защитного колпачка так, чтобы он отделился от ланцета (1/4 оборота).

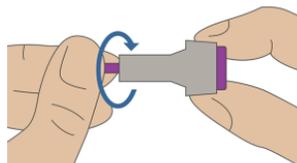


- Плотно прижмите безопасный ланцет к обработанному месту прокола, нажмите пусковую кнопку.

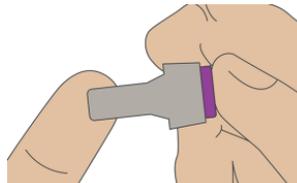

- Удалите первую каплю крови и выполните взятие пробы крови.

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ВЗЯТИЯ КРОВИ С ПОМОЩЬЮ МИКРОВЕТТЫ.

- Снимите крышку с пробирки, слегка повернув ее.
- Наденьте крышку на дно пробирки.
- Используйте любой край пробирки для взятия пробы крови.

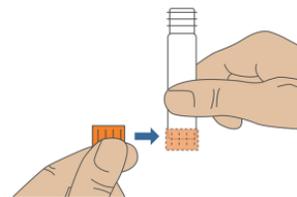

- Удерживайте конечность с проколом так, чтобы она была опущена вниз.
- Избегайте многократных сильных нажатий на проколотый палец.




- Заполните пробирку до отметки 500.
- Если вам не удастся собрать достаточное количество образца, вы можете сделать еще один прокол, используя для этого другой палец.

Нарушение указаний приводит к ухудшению качества образца, что может исказить результат анализа!

- Снимите крышку с основания пробирки и плотно закройте микроветту (до щелчка).

- Тщательно и осторожно перемешайте пробу, поворачивая ее от себя и возвращая в исходное положение. Не трясите!

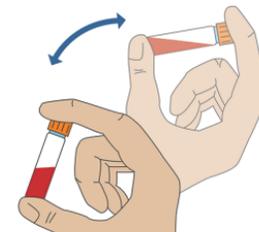

- Вставьте микроветту с образцом в транспортную пробирку и закройте крышку, поставьте транспортную пробирку в мягкий бокс в коробочке, дайте отстояться вертикально в течение 15 мин.
- Поместите коробочку с пробиркой в холодильник в строго вертикальном положении и вызовите курьера в личном кабинете на сайте myareal.ru

После передачи коробочки курьеру отслеживайте статус исследования в вашем личном кабинете на сайте myareal.ru

Если у вас остались вопросы, звоните по телефону +7(495) 150-2006